



Návod k použití – čeština (CS)



www.3pp-eifu.com

Popis: Dlahy na prsty Oval-8 jsou lisované plastové pomůcky určené k nasazení na prst za účelem jeho podpory, ochrany a vyrovnání. Jsou k dispozici ve 14 velikostech, aby vyhovovaly různým velikostem prstů. Dlahy na prsty Oval-8 jsou vodotěsné a lze je nosit i za mokra.

Určené použití: Dlahy na prsty Oval-8 jsou navrženy tak, aby působily na tři body kolem prstu, udržovaly kloub v rovné poloze, zabraňovaly nebo omezovaly pohyb za účelem ochrany a umožňovaly hojení. Pomůcka může být použita k léčbě různých stavů prstů v závislosti na tom, kde a jak je na prstu nasazena.




Upozornění: Nepoužívejte na otevřené rány. Nepoužívejte v případě otoku. Nepoužívejte na prsty u nohou. Zařízení může způsobit podráždění nebo tlak na prst. V případě podráždění nebo tlaku přestaňte zařízení používat. Pokud podráždění přetrvává, obraťte se na svého lékaře.


Dodržujte pokyny pro čištění v pravidelných intervalech. Upozornění: Nesmí být nošeno dětmi mladšími 5 let. Při spolknutí může způsobit udušení.

Návod: Jak nosit dlahy na prsty Oval-8 při různých potížích s prsty.


1. Deformita typu „boutonniere“

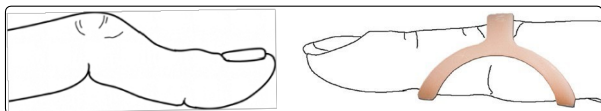


4. Malletův prst

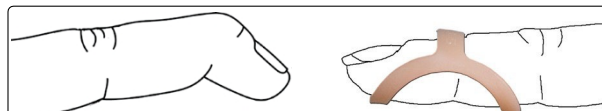


2. Křivý prst

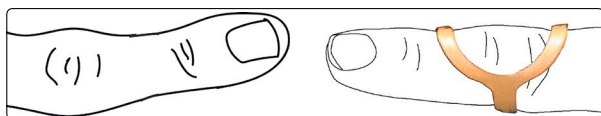


5. Deformita labutího krku

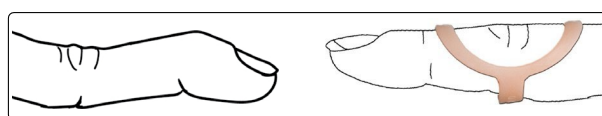


3. Triggerový palec

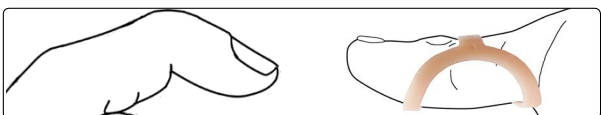


6. Triggerový prst

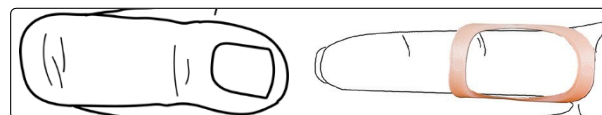

Poznámka: Dlahy Oval-8 sedí těsněji nebo volněji v závislosti na tom, který konec se nasadí na prst jako první. Znaménko plus + označuje volnější konec.

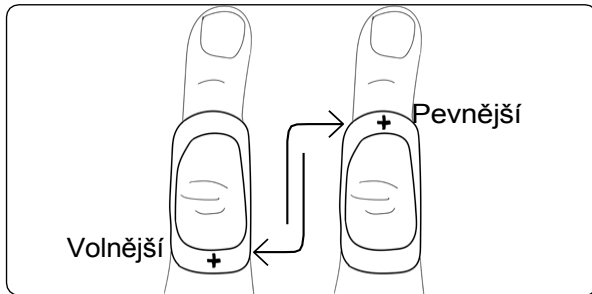

Oval-8 béžová a průhledná

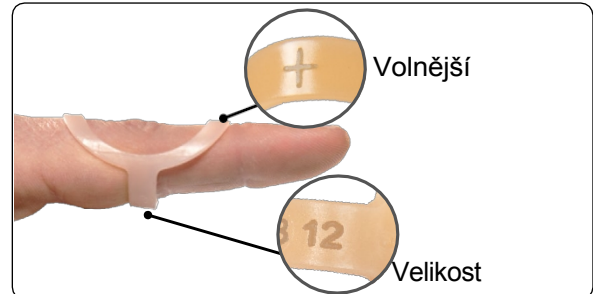

Vlastnosti jsou stejné u obou barev

Měření pro prstovou dlahu Oval-8: Pokyny pro měření prstů za účelem výběru správné velikosti produktu naleznete na stranách 3 a 4.

Dodávané balení: Oval-8 béžová je vyrobena z čistého polypropylenu. Oval-8 průhledná je vyrobena z kopolyesteru. Výrobek neobsahuje latex. Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozené. Skladujte na chladném a suchém místě. Je k dispozici ve 14 velikostech, balených v různých množstvích. Možnosti balení jsou uvedeny na straně 4.

Čištění: Výrobek pravidelně umývejte ručně mýdlem a vodou a nechte jej uschnout na vzduchu. Výrobek dezinfikujte 70% isopropylalkoholem nebo 10% roztokem bělidla.

Likvidace: Výrobek je určen k opakovanému použití u stejné osoby. Pokud výrobek vykazuje známky nadměrného opotřebení, zlikvidujte jej a v případě potřeby jej nahradte novým výrobkem.


Kdy vyhledat lékařskou pomoc: Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u vás vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky související s tímto zařízením, včetně kožních reakcí nebo změn zdravotního stavu.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienta: V případě nežádoucí události související s tímto zařízením zařízení odstraňte a událost nahlase distributorovi a oprávněnému zástupci v členském státě, ve kterém uživatel bydlí.

Distributoři: www.3pp-eifu.com/#distributors

Symbyly na štítku: Všechny symboly použité na štítku výrobku nebo v produktové dokumentaci jsou vysvětleny v legendě symbolů společnosti 3-Point Products zde: www.3pp-eifu.com/#symbols



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str. 16
5020 Salcburk Rakousko
service@sallmann-medical.eu






Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug



Změření prstů pro oválnou dlahu na 8 prstů

Dlahy na prsty Oval-8 jsou zdravotnický prostředek a neúčinnějších výsledků obvykle dosáhnete, pokud dobře přiléhají. Správná velikost závisí na tom, o jaký problém s prstem se jedná a kde bude dlahu nosit. Postupujte prosím podle pokynů

Budete potřebovat:

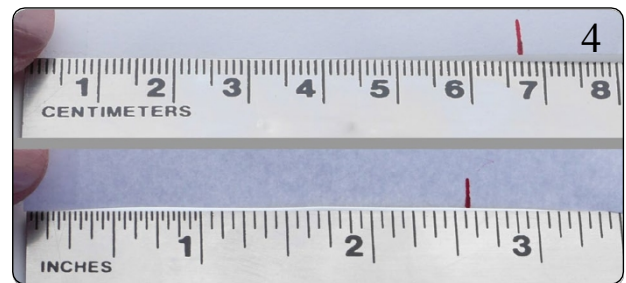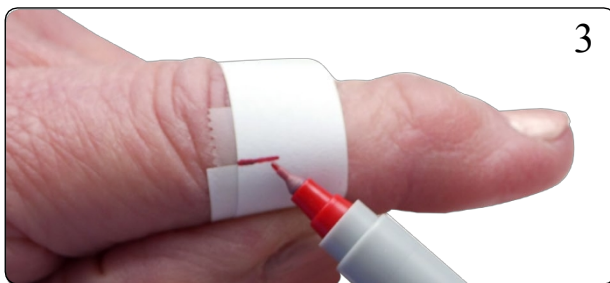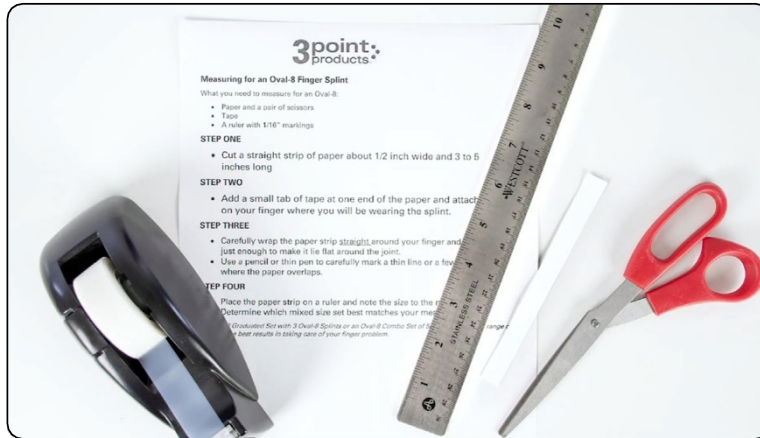

Originál



Dlahy na prsty

Tabulky velikostí a balení Oval-8

Tabulka velikostí Oval-8		
Velikost Oval-8	Míry v palcích	Rozměry v centimetrech
2	1-3/4"	4,3
3	1-13/16"	4,5
4	1-15/16"	4,95
5	2-1/6"	5,27
6	2-3/16"	5,7
7	2-5/16"	5,86
8	2-7/16"	6,14
9	2-1/2"	6,35
10	2-11/16"	6,82
11	2-13/16"	7,09
12	2-15/16"	7,4
13	3"	7,65
14	3-3/16"	8,09
15	3-1/4"	8,2

Tabulka balení Oval-8						
Velikost Oval-8	Jedna (1) v balení	Tři (3) v balení	Pět (5) v balení	Balení s více velikostmi tři (3) velikosti	Sada Oval-8 Klinická krabička s 44 dlahami K dispozici pouze v béžové barvě Množství na velikost	
2	√	√	√	2-3-4	Velikost 2 a 15	1
3	√	√	√	4-5-6	Velikost 3-4 a 13-14	2
4	√	√	√	6-7-8	Velikost 11 a 12	3
5	√	√	√	8-9-10	Velikost 5 a 10	4
6	√	√	√	10-11-12	Velikost 6-7-8-9	5
7	√	√	√	13-14-15		
8	√	√	√			
9	√	√	√	Balení s více velikostmi pět (5) velikostí	Sada velikostí po jednom (1) kuse z každé velikosti – celkem 14	
10	√	√	√	2-3-4-5-6	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	
11	√	√	√	5-6-7-8-9		
12	√	√	√	8-9-10-11-12		
13	√	√	√	11-12-13-14-15		
14	√	√	√			
15	√	√	√			
Všechny balíčky nemusí být dostupné u všech prodejců						